

## **FISH Rearranjo IGH/BCL2 - Translocação 14;18**

**Preparo:** Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Hemato-Oncologia" preenchido e assinado pelo médico solicitante.

**Amostra:** Medula óssea, Sangue Periférico (Tubo Heparina - tampa verde) ou Tecido: Bloco de parafina contendo linfonodo: Favor enviar relatório anátomo-patológico Fragmentos de tecido, biópsia ou peças cirúrgicas pequenas: fixados em formol tamponado a 10% em recipiente apropriado (O volume de formol para biópsias deve ser de 10 ml; para peças cirúrgicas deve ser 3 X o seu volume).

**Transporte:** Medula Óssea e Sangue Periférico: Refrigerado  
Tecido: Temperatura ambiente

**Rejeição:** Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante

Material com fragmentos insuficientes como biópsia  
Artefatos de fixação ou processamento do espécime  
Tecido encaminhado sem fixador

**Método:** Hibridação "in situ" por fluorescência (FISH)

### **Referência:**

- Negativo para a translocação 14;18

**Interpretação:** Auxílio no Diagnóstico de Linfoma Folicular.