

Mutações no Gene EGFR

Preparo: Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Oncologia Molecular" preenchido e assinado pelo médico solicitante.

Amostra: Bloco de parafina contendo tecido: Favor enviar relatório anátomopatológico Fragmentos de tecido, biópsia ou peças cirúrgicas pequenas: fixados em formol tamponado a 10% em recipiente apropriado (O volume de formol para biópsias deve ser de 10 ml; para peças cirúgicas deve ser 3 X o seu volume).

Amostra Alternativa: Punção do tumor com controle citológico positivo.

Transporte:Temperatura ambiente

Rejeição:Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante

Material com fragmentos insuficientes como biópsia Artefatos de fixação ou processamento do espécime Tecido encaminhado sem fixador

Método: Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Referência:

- Ausência de substituição 2573 G>T (L858R) e deleções parciais no exon 19 (2240del18; 2240del12; 2235del15) do gene EGFR
 - Ausência de substituição T790M no gene EGFR

Interpretação:Auxílio na predição de resposta ao tratamento com Inibidores Tirosina Quinase (EGFR-TKIs), em carcinoma pulmonar de células não pequenas.